

Dane aktualne na dzień: 14-06-2026 13:06

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/mediline-velodes-silk-5l-plyn-do-higienicznej-i-chirurgicznej-dezynfekcji-rak-p-2996.html>



## Mediline Velodes® Silk 5l Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Cena brutto	<b>206,74 zł</b>
Cena netto	<b>191,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2-4 dni robocze</b>
Kod produktu	<b>ML564</b>
Submarka	<b>Medi-line</b>
Producent	<b>Medisept</b>

### Opis produktu

#### Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Velodes® Silk to alkoholowy, gotowy do użycia produkt przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze medycznym, sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej, a także do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Przeznaczony również do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Wykazuje działanie bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, COVID-19). Jako wyrób medyczny do stosowania przez profesjonalnego użytkownika. Postać płynna.

- Higieniczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 30 sek.
- Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 3 min.
- Skuteczny wobec wirusów Rota, Noro, Corona.
- Łagodne dla skóry pH.
- Zawiera substancję pielęgnującą – glicerynę.
- Przebadany dermatologicznie.
- Gwarancja skuteczności potwierdzona badaniami.
- Nawilża i pielęgnuje dłonie.
- Wygodny w użyciu.
- Szybkie działanie.
- Zapobiega uczuciu lepkości dłoni
- Produkt zawiera deklaracje zgodności UE
- Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym
- Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania
- Typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

#### Sposób użycia:

Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s).  
Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s).

**Skład:**

Substancja czynna w 100 g produktu: 63,7 g – etanol, 6,3 g – propan-2-ol

**Uwaga:**

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.



Sprawdź pozostałe [płyny do dezynfekcji rąk](#)