

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/plyn-do-dezynfekcji-powierzchni-na-bazie-alkoholu-grepfrutowy-velox-spray-top-af-1l-p-1678.html>



Płyn do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu grepfrutowy Velox Spray TOP AF 1L

Cena brutto	46,58 zł
Cena netto	43,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	ML924
Producent	Medisept

Opis produktu

Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni VELOX TOP AF 1L grapefruit

Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni, a tak że powierzchni mających kontakt z żywnością. Działa już w 30 sekund! Posiada przyjemny, grapefruitowy zapach. Zalecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz protez i wycisków silikonowych. Środek nie zawiera aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt ten uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

- przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych
- szerokie spektrum mikrobójcze już w 30 sekund: bakterie, prątki, grzyby, wirusy (patrz niżej)
- nie zawiera aldehydów i QAV (fenolu)
- zapach grepfrutowy
- gotowy do użycia
- gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania
- nie odbarwia powierzchni
- pojemność 1 litr
- produkt zawiera deklaracje zgodności UE
- posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym
- produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1276	30 sek.	1 min.
	EN 13967	30 sek.	1 min.
	EN 13727	30 sek.	
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 1650	30 sek.	1 min.
	EN 13624	30 sek.	
Prątki grzyźlicy (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	30 sek.	1 min.
Wirusy otoczkowe (HBV,	RKI/DVV	30 sek.	30 sek.

HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola)			
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	
Wirus Adeno	EN 14476	1 min.	

Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm. dbając o całkowite jej pokrycie. Powierzchnia nie wymaga splukania wodą, wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie stosować na powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe)

Skład

Substancja czynna w 100 g produktu: 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol

Uwaga:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

