

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/plyn-do-dezynfekcji-powierzchni-na-bazie-alkoholu-grepprutowy-velox-spray-top-af-5l-p-1679.html>



Płyn do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu grejfrutowy Velox Spray TOP AF 5L

Cena brutto	171,40 zł
Cena netto	158,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Kod produktu	ML931
Producent	Medisept

Opis produktu

Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni VELOX SPRAY 5L grejfrutowy

Gotowy do użycia, środek na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni, a tak że powierzchni mających kontakt z żywnością. Posiada przyjemny zapach grejfruta. Zalecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz protez i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

- przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885)
- szerokim spektrum mikrobójcze : bakterie, prątki, grzyby, wirusy w czasie 30 sekund
- nie zawiera aldehydu i fenolu
- zapach grejfrutowy
- preparat gotowy do użycia
- gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania
- nie odbarwia powierzchni
- wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo sztuczne (ABS) i materiały obiciowe
- produkt zawiera deklaracje zgodności UE
- posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym
- produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1276	30 sek.	1 min.
	EN 13967	30 sek.	1 min.
	EN 13727	30 sek.	
Grzyby (C. albicans)	EN 1650	30 sek.	1 min.
	EN 13624	30 sek.	
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	1 min.
Wirusy otoczkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola)	RKI/DVV	30 sek.	30 sek.

Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	
Wirus Adeno	EN 14476	1 min.	

Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm. dbając o całkowite jej pokrycie. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą, wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie stosować na powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe)

Skład:

Substancja czynna w 100 g produktu: 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol

Uwaga:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

CE 2274