

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/preparat-do-mycia-i-dezynfekcji-narzedzi-obrotowych-viruton-bohr-1l-p-1698.html>

## Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych Viruton Bohr 1L

Cena brutto	<b>52,60 zł</b>
Cena netto	<b>48,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2-4 dni robocze</b>
Kod produktu	<b>ML290</b>
Producent	<b>Medisept</b>

### Opis produktu

#### Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych instrumentów medycznych Viruton Bohr 1L

Viruton® Bohr, to gotowy do użycia preparat zalecany do dezynfekcji w stomatologii. Skutecznie zdezynfekuje wiertła, frezy kostne ze stali, twarde metale, diamenty, narzędzia ściernie i polerujące takie jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzia do leczenia kanałowego. Zawiera inhibitor korozji, dzięki czemu idealnie chroni instrumenty ze stali i stopów metali. Może być stosowany do narzędzi aluminiowych. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej.

#### Główne cechy preparatu:

- przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885)
- preparat gotowy do użycia
- szerokie spektrum mikrobójcze (patrz niżej)
- niskie pH i zawartość inhibitorów korozji
- wysoka tolerancja materiałowa
- wysoka redukcja ryzyka zakażenia
- zabezpieczenie przed korozją i uszkodzeniem instrumentów
- skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne
- produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne wysokie
<b>Bakterie</b> (w tym MRSA)	EN 13727, EN 14561	15 min.
<b>Grzyby</b> ( <i>C. albicans</i> )	EN 13624, EN 14562	15 min.
<b>Prątki gruźlicy</b> ( <i>M. avium</i> , <i>M. terrae</i> )	EN 14348, EN 14563	15 min.
<b>Wirusy osłonkowe</b> (HBV, HCV, HDV, HIV, Vaccinia, BVDV)	EN 14476	15 min.
<b>Wirus Adeno</b>	EN 14476	15 min.

---

<b>Wirus Polio</b>	EN 14476	15 min.
--------------------	----------	---------

**Opakowanie**

butelka 1 litr z dozownikiem (dostępny również w [kanistrze 5L](#))

**Skład:**

Substancje czynne w 100 g produktu: 0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-dia-mina, 0,14 g masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu.